

A hand is holding a white, handheld device, possibly a laser or light source, against a dark background. The device has a cylindrical shape with a metallic-looking tip. The lighting is dramatic, highlighting the contours of the device and the hand. The overall mood is mysterious and technological.

TRILASER

LA NUOVA FRONTIERA DELL'EPILAZIONE LASER

I peli superflui, si sa, rappresentano un inestetismo fastidioso sia per le donne che per gli uomini, costringendo periodicamente a ricorrere a una soluzione (depilazione, ceretta, ...) che però non è mai "definitiva".

L'**EPILAZIONE LASER** È UNA DELLE TECNICHE PIÙ EFFICACI PER RIMUOVERE I PELI CON EFFETTI DURATURI.

Baldan Group ha ampliato l'offerta delle tecnologie di epilazione dedicata all'estetica professionale con **Trilaser**, l'innovativo macchinario che combina **efficacia, rapidità e comfort**, permettendo un'epilazione con **effetti più significativi e duraturi** rispetto alle altre tecnologie.

TRILASER

TRIPLA LUNGHEZZA D'ONDA

LA **CARATTERISTICA DI TRILASER**

È LA COMBINAZIONE DI TRE LUNGHEZZE D'ONDA
IN UNICO MANIPOLO:

1. 808nm
2. 950nm
3. 1064nm

NEL RISPETTO DELLA
NORMATIVA ESTETICA!

Perché sceglierlo:

- Efficace, rapido, sicuro e indolore
- Adatto ad ogni fototipo e anche su pelli abbronzate
- 3 lunghezze d'onda laser in un unico manipolo
- Sistema di raffreddamento "Chiller"

TRILASER

EPILAZIONE LASER RAPIDA, EFFICIENTE E CONVENIENTE

IL MANIPOLO TRILASER,

Con la sua dimensione dello spot e le tre lunghezze d'onda, riduce significativamente i tempi di lavoro e rende i trattamenti completi e sicuri.

Le dimensioni dello spot consentono dunque di epilare rapidamente vaste aree del corpo, riducendo la durata del trattamento.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni spot: 1,2cm x 2,0 cm = 2,4 cm²
- Potenza 2000 watt

TRILASER

LE 3 LUNGHEZZE D'ONDA PER UN EFFETTO MASSA

Il **manipolo Trilaser** combina 3 lunghezze d'onda che funzionano contemporaneamente, permettendo, **nell'arco della stessa seduta**, di raggiungere in profondità tutta la struttura del follicolo pilifero: la 950nm più profonda della 808nm e la 1064nm più profonda della 950 nm.

IL NUMERO DI PELI CHE SI RIDURRANNO FIN DALLA PRIMA SEDUTA, SARÀ IMPRESSIONANTE!

808 nm

Ha come bersaglio la melanina presente nel bulbo pilifero, raggiungendola e liberando l'energia luminosa che brucia il bulbo.

950 nm

Ha come bersaglio l'acqua intorno al bulbo, la raggiunge e la evapora. Il bulbo muore per disidratazione.

1064 nm

Ha come bersaglio i vasi sanguigni intorno al bulbo, li raggiunge e li secca. Il bulbo muore per mancanza di nutrimento portato dal sangue.



TRILASER

ANAMNESI CON TELECAMERA

Trilaser è dotato di Dermatoscopio, "l'occhio clinico" che ci permette di analizzare il pelo ed impostare tutti i parametri del macchinario.

Otteniamo così parametri come :

Tipo di Pelo
Spessore del Pelo
Fototipo cliente
Sensibilità individuale
Analisi distrettuale della pelle


Questo ci permette di determinare i risultati che si possono ottenere ed in quante sedute si può raggiungere una riduzione pilifera stabile di circa il 80-90%.

TRILASER

Questo significa affrontare l'epilazione da vero professionista perché potrai creare un programma su misura per il tuo cliente.

Grazie a questa anamnesi scientifica si farà davvero la differenza con gli altri centri.

Quantità peli

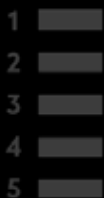

AREA / SELEZIONE

- VISO
- CORPO FRONTE
- ARTI SUPERIORI**
- ARTI INFERIORI



Quantità peli



AREA / VISO

- Basette
- Guance
- 1 Attaccatura capelli**
- 2 Zigomi**
- Orecchie
- Labbra
- 5 Mento**





SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO "CHILLER"

TUTTO IL GIORNO, ZERO DOLORE

Trilaser adotta il sistema di raffreddamento "Chiller" che garantisce sicurezza e comfort per il cliente e il controllo della temperatura.

Il sistema "Chiller", è un vero e proprio gruppo refrigerante che consente un utilizzo prolungato della tecnologia: l'operatore infatti può eseguire trattamenti per tutto il giorno (anche la notte se necessario) senza neppure un attimo di sosta.

Il raffreddamento del vetrino, a contatto con la pelle, è così potente che annulla la percezione del dolore.

QUESTO SISTEMA È UN'ESCLUSIVA
DELLE AZIENDE TOP NEL MONDO

TRILASER

FOTORINGIOVANIMENTO

La funzione di fotingiovanimento è una tecnica che utilizza la luce emessa dai laser a bassa potenza per stimolare la produzione di collagene e elastina nella pelle. Questa tecnica viene utilizzata per ridurre i segni dell'invecchiamento, come rughe, linee sottili e macchie scure sulla pelle. La luce del laser viene assorbita dalle cellule della pelle, aumentando la produzione di collagene e migliorando la texture e la luminosità della pelle. Il trattamento è non invasivo e non richiede tempo di recupero significativo.

TRILASER

I VANTAGGI

1. EFFETTO MASSA

Aadatto anche ai peli resistenti agli altri laser con diradamento enorme già dalla prima seduta.

2. VELOCITÀ DI TRATTAMENTO

Per una schiena bastano 20/25 minuti.

3. NUOVI CLIENTI

Si possono trattare anche i peli molto chiari.

4. INCASSI TUTTO L'ANNO

Si possono trattare anche le pelli scure e abbronzate, lavorando quindi tutto l'anno, anche nel periodo estivo.

5.SISTEMA CHILLER

Trattamento completamente indolore



TRILASER

TRILASER

LE NOSTRE SEDI

Belgio
Lussemburgo
Francia
Olanda
Germania
Austria
UK
Irlanda
Svizzera
Russia
Kuwait
Romania
UAE
Messico
Colombia
Turchia
Cipro



BALDAN
G R O U P
www.baldangroup.com